



Snabbmanual NeuroTrac MultiTENS


1. Ta av batteriluckan. Sätt in ett 9V batteri i batterihuset – alkaliskt eller uppladdningsbart. Stäng batteriluckan.

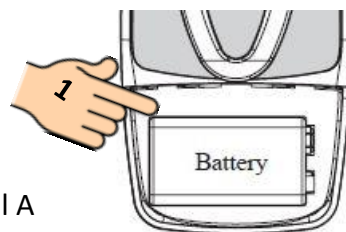

2. Plugga in apparatledningarna på toppen av apparaten. kanal A (CH A vänster sida) om en kanal ska användas och Kanal B (CH B höger sida) om bägge kanalerna ska användas. Använd alltid kanal A (CH A) om endast en kanal skall användas.

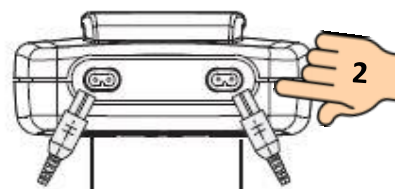

3. Ta ut hudelektrodena ur påsen. Ta inte bort dem ifrån plastfilmen ännu. Fäst dem på de medföljande kablarna. Kontakterna på apparatkablarna pluggas in i ledningarna som sticker ut från hudelektrodena.

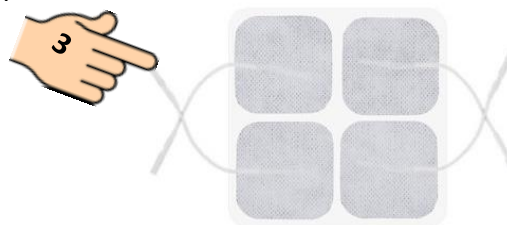


Du behöver två elektroder till varje kabel. Huden runt behandlingsområdet skall inte vara fet eller oljig. Raka med fördel bort hårväxt (dagen innan).


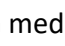
Ta nu bort hudelektrodena ifrån plastfilmen och placera dem på huden

4. Fäst elektroderna på kroppen. Elektroderna placeras i eller runt det smärtande området, på dermatomet i närliggande områden, över triggerpunkt eller på muskelbuken. Se även sid. 20 i huvudmanualen för olika elektrodplaceringar.



5. Slå på apparaten genom att trycka på knappen PÅ/ AV  mitt på apparaten.




6. Önskar du att stimulera med samma program på båda kanalerna A och B, väljer du samma program (PO1-P13) på båda kanalerna genom att trycka på **PRG 1**  och **PRG 2**  knapparna. Önskar du att stimulera med två olika program (PO1-P13) samtidigt, väljer du önskat program med **PRG 1** och **PRG 2** knapparna för respektive utgångar. Det är endast möjligt att stimulera med två olika program samtidigt på program PO1-P13. I program P14-P17 måste samma program köras på båda kanalerna.


7. För att starta stimuleringen tryck på + knappen till vänster om du använder endast en kanal A (CH A) eller båda + knapparna om du använder både kanal A och kanal B. Välj önskad stimuleringsstyrka (mA) genom att fortsätta att trycka på + knappen till önskad styrka. Stimuleringen reduceras genom att trycka på – knappen. När du är i gång med stimuleringen, visas återstående tid av programmet i displayen.



8. Om du önskar att pausa programmet under stimuleringen så trycker du på **PRG 1** knappen och stimulatorn går i pausläge. För att åter aktivera stimuleringen, tryck på + knappen till önskad styrka.

9. Apparaten låses automatiskt efter 60 sekunder. Vill du öka stimuleringsstyrkan (mA) på den enskilda kanalen efter det att apparaten har låst sig, trycker du först på – knappen och därefter kan du öka stimuleringen genom att trycka på + knappen till önskad styrka.

10. NeuroTrac MultiTENS piper fem gånger när behandlingen är färdig. Därefter stänger apparaten av sig automatisk. Du kan alltid avsluta behandlingen genom att trycka PÅ/AV  knappen.

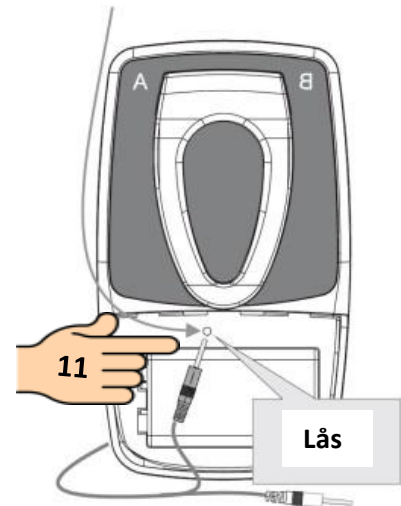

11. Terapeuten kan låsa apparaten så att användaren endast kan använda det förvalda programmet. Vid upplåsning kan terapeuten se användarstatistik. Apparaten låses genom att trycka en gång på knappen under batteriluckan (se huvudmanualen -instruktion för låsning/upplåsning).

12. Viktigt: Ta inte bort ledningarna medans apparaten är påslagen. Fäst elektroderna åter på plastfilmen och lägg tillbaka dem i påsen.

Alla hudelektroder kan beställas via AB Medifa

E-mail: order@medifa.se

Telefon: 070-305 37 35