



NeuroTrac MultiTENS

Snabbmanual

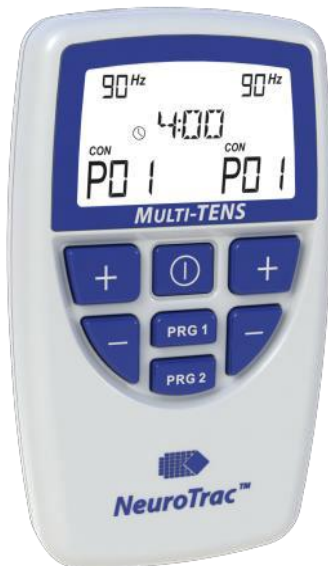

1. Ta av batteriluckan och sätt i ett 9 volts batteri eller motsvarande uppladdningsbart batteri och stäng därefter luckan igen.
2. Fäst kablarna i apparatens kanalutgångar, kanal A (vänster märkt CH.A) och kanal B (höger märkt CH.B). Om du endast använder en ledning/kabel, fäst denna till vänster (CH.A).
3. Ta ut hudelektroderna ur påsen, ta inte bort dem ifrån plastfilmen ännu.
4. Fäst en elektrod till varje ”pinne” i ändan av ledningen/kabeln. Du behöver två elektroder per ledning/kabel.
5. Kontrollera att huden runt behandlingsområdet inte är fet eller oljig. Raka gärna bort hår i området.
6. Dra nu försiktigt bort elektroderna ifrån plastfilmen – **kasta inte bort plastfilmen!**
7. Fäst elektroderna på kroppen (se mer om elektrodplacering i bruksanvisningen s. 23). Om du är osäker på elektrodplaceringen rådfråga er terapeut för vägledning.
8. Slå på MultiTENS apparaten genom att trycka en gång på **On**, som du finner mitt på apparaten.
9. Vanligtvis så har din terapeut redan bestämt vilket program du skall använda och låst apparaten i detta program. Val av programmet står nederst i displayen. Se översikt i bruksanvisningen sid. 11 eller på apparatens baksida

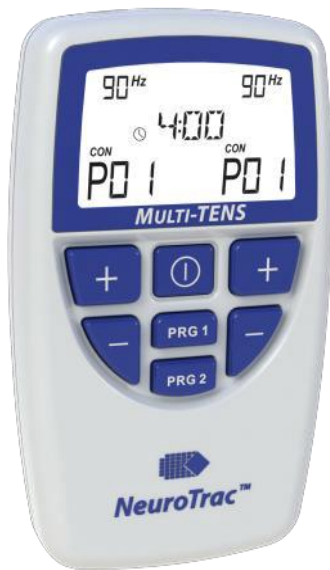

- Frekvens och pulsbredd på de två valda programmen ses överst i displayen.

-Val av olika program, ex P01 ses på de två valda programmen längst ner på displayen.



Du som skall ställa in ett eget program (apparaten får inte vara låst): Välj önskat program genom att trycka på programknappen **PRG 1** (som styr programval på kanal A/CH.A) och **PRG 2** (som styr programval på kanal B/CH. B).

Önskar du att stimulera med samma program på båda kanalerna (CH.A och CH.B) väljer du samma program (P01-P13) på bägge kanaler, genom att trycka på **PRG1** och **PRG 2** knapparna. Önskar du att stimulera med olika på program P01-P13) samtidigt, väljer du önskat program med **PRG 1** och **PRG 2** knapparna för respektive utgångar. Du kan alltid se valet av frekvens och valet av pulsbredd på skärmen. Det är bara möjligt att stimulera med två olika program samtidigt på programval P01-P13. I programmen P14- P17 så körs samma program på båda kanalerna A och B.

10. Tryck på **+** för att starta stimuleringen på önskad kanal (+ till vänster styr kanal A, CH.A + till höger styr kanal B, CH.B) och välj önskad stimuleringsstyrka (mA) genom att fortsätta att trycka på + knappen för respektive kanaler. Stimuleringen minskas/reduceras genom att trycka på - knappen. Du ställer själv in önskad stimulering.
11. Apparaten låses automatiskt efter 60 sec. Skall du öka stimuleringsstyrkan (mA) på den ena kanalen efter att apparaten låst sig så trycker du bara tre gånger på + knappen, så vill stimuleringen ökas igen på fjärde trycket.
12. NeuroTrac MultiTENS piper fem gånger när behandlingen är färdig och avslutad. Detta upprepas under en minut och därefter stänges apparaten av sig själv. Om du önskar att avsluta programmet innan det är färdigt. Slå av apparaten på av/på knappen.
13. Terapeuten kan låsa apparaten om brukaren endast skall använda det valda programmet. Se bruksanvisningen sid: 15–17 om låsning och avläsning av användarstatistik.
14. VIKTIGT: TA INTE BORT KABLARNA MEDANS APPARATEN ÄR PÅSLAGEN.

Du som önskar att skapa egna program i apparaten se sid: 10–15 i bruksanvisningen.