


Snabbmanual NeuroTrac Rehab Liberi

1. Ta av batteriluckan. Sätt in ett 9V batteri i batterihuset – alkaliskt eller uppladdningsbart. Stäng batteriluckan

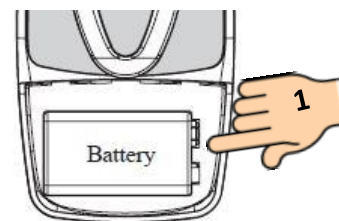

2. Ta ut hud elektroderna ur påsen. Ta inte bort dem ifrån plastfilmen ännu. Fäst dem på de medföljande kablarna. Kontakterna på apparatkablarna pluggas in i ledningarna som sticker ut från hud elektroderna.




Ta nu bort hud elektroderna ifrån plastfilmen.


3. Fäst elektroderna på kroppen. Elektroderna placeras i eller runt det smärtande området, på dermatomet i närliggande område, över triggerpunkt eller på muskelbuken. Vid TEMS och funktionell muskelstimulering (FES) placeras elektroderna över muskelbuken. Vid användning under förlossning gäller andra elektrodplaceringar, tala med din barnmorska eller annan sjukvårdspersonal.





4. Plugga in apparatledningarna på toppen av apparaten. Kanal A (vänster sida) om en kanal ska användas och Kanal B (höger sida) om båda kanalerna ska användas. Använd alltid kanal A om endast en kanal skall användas.

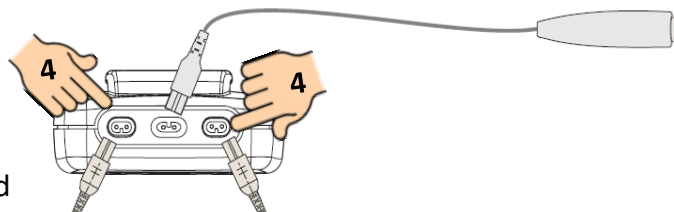

Om du skall använda handomkopplaren dvs endera P5 till basstimulering (RST)/ intensivstimulering (BST) ex. vid förlossning eller P11-P14. Plugga in ledningen i den mittersta utgången på toppen.

5. Slå på apparaten genom att trycka på knappen PÅ/ AV  som du finner mitt på apparaten.

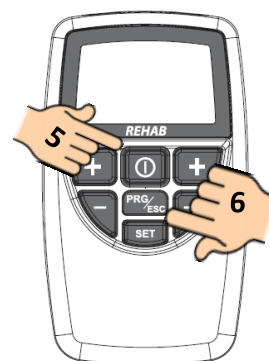

6 Tryck på program-knappen PRG/ESC  för att välja program.


Programöversikt:

P01-P08 Förinställda TENS-program utan handomkopplaren.



P05, P11-P14 Förinställda STIM/NMES- program med handomkopplaren.

P16-P19 Förinställda STIM/NMES- program utan handomkopplare.

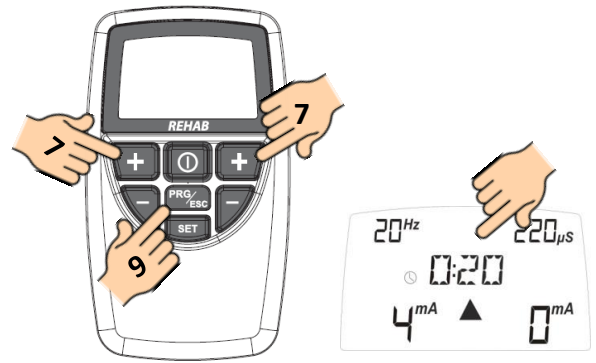7. För att starta stimuleringen tryck på + knappen till vänster om du använder endast en kanal A eller båda + knapparna om du använder både kanal A och kanal B. Välj önskad stimuleringsstyrka (mA) genom att fortsätta att trycka på + knapparna. Stimuleringen reduceras genom att trycka på – knappen. När du är i gång med stimuleringen, visas återstående tid av programmet i displayen.



8. Apparaten låses automatiskt efter 60 sekunder. Vill du öka stimuleringsstyrkan (mA) på den enskilda kanalen efter det att apparaten har låst sig. Trycker du först på – knappen och därefter kan du öka stimuleringen genom att trycka på + knappen till önskad styrka.

9. Du kan alltid avsluta behandlingen genom att trycka PÅ/AV  knappen. Önskar du pausa under behandlingen, tryck på PRG/ESC . Återuppta behandlingen genom att trycka på + knappen till önskad styrka.

10. Viktig: Ta inte bort ledningarna medans apparaten är påslagen. Fäst elektroderna åter på plastfilmen och lägg tillbaka dem i påsen.

Om användning med handomkopplaren:

1. Handomkopplaren kan användas till program P05 och P11- P15.

2. Vid användning av P05 används handomkopplaren till att ändra stimulering mellan RST och BST (se huvudmanualen).

Vid användning av P11-P15 används handomkopplaren för att starta och stoppa stimuleringen (handomkopplaren styr över de förinställda sek för av/på).



Önskar du att skapa ett eget program i P9-P10 och P15 se huvudmanualen.

Alla hudelektroder kan beställas via AB Medifa

E-mail: order@medifa.se

Telefon: 070-305 37 35