

Ferticare 2.0



Design:

Ferticare 2.0 är en handhållen vibrator för män med ryggmärgsskador som önskar att få hjälp till ejakulation.

Den uppdaterade modellen är mer strömlinjeformad än den tidigare modellen av Ferticare.

AV/PÅ och frekvenskontroll:

Ferticare 2.0 slås av och på genom att vrida på hjulet för frekvenskontroll. Varje steg på hjulet ökar frekvensen med 10 Hz.

Frekvensen kan ställas in mellan 70 och 110 Hz. Vibratorn lyser när den är på.

Amplitudsreglering:

Amplituden ställs in genom att vrida på hjulet. Aktuell amplitud visas på amplitud-indikatorn.

Användning:

Den vibrerande plattan placeras vid ovasidan (dorsum) eller undersidan (frenulum) av penisens ollon.

Specifikation:

Batteri: Litiumjon-batteri, inklusive batteriladdare

Användningstid: Minst 20 minuter (vid amplitud 2,5 mm och frekvens 100 Hz)

Frekvens: 70-100 Hz

Amplitud: 0,5- 4,0 mm.

